

	Titre Ordre de prelevement des tubes et recommandations pour les prélèvements sanguins		
	Référence FTC/LAB/0005/007	Page 1 / 2	
Service émetteur Laboratoire de Biologie	Date de création 27/09/2022	Date d'application 28/09/2022	

Avant tout prélèvement, consulter si besoin le manuel de prélèvements du laboratoire

<https://chpg.manuelprelevement.fr/>

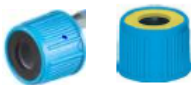
ORDRE DE PRELEVEMENT A RESPECTER SANS HEMOCULTURE AVEC BILAN DE COAGULATION			Nombre de retournements
1		Tube de purge à jeter après remplissage partiel	A jeter
2	 	Tube citraté (bouchon bleu) Remplissage parfait indispensable jusqu'au trait de jauge	8 à 10 fois
3	 	Tube sec sans séparateur (bouchon rouge) et/ou avec gel séparateur (bouchon jaune)	8 à 10 fois
4		Héparinate de lithium (bouchon vert)	8 à 10 fois
5		EDTA (bouchon violet)	8 à 10 fois
6		Fluorure de sodium (bouchon gris) Autres etc...	8 à 10 fois

Attention : Ne jamais transvaser le sang d'un tube à l'autre car l'anticoagulant est différent selon le tube
Ne pas utiliser de flacon ou de tube au-delà de la date de péremption

ORDRE DE PRELEVEMENT À RESPECTER SI BILAN DE COAGULATION SEUL			Nombre de retournements
1		Tube de purge à jeter après remplissage partiel	A jeter
2	 	Tube citraté Remplissage parfait indispensable jusqu'au trait de jauge	8 à 10 fois

Identifier les tubes et/ou les flacons

	Titre Ordre de prelevement des tubes et recommandations pour les prélèvements sanguins		
	Référence FTC/LAB/0005/007	Page 2 / 2	

ORDRE DE PRELEVEMENT A RESPECTER SANS HEMOCULTURE NI BILAN DE COAGULATION			Nombre de retournements
1		Tube sec sans séparateur (bouchon rouge) et/ou avec gel séparateur (bouchon jaune)	8 à 10 fois
2		Héparinate de lithium (bouchon vert)	8 à 10 fois
3		EDTA (bouchon violet)	8 à 10 fois
4		Fluorure de sodium (bouchon gris) Autres etc...	8 à 10 fois
Attention : Ne jamais transvaser le sang d'un tube à l'autre car l'anticoagulant est différent selon le tube Ne pas utiliser de flacon ou de tube au-delà de la date de péremption			
Identifier les tubes et/ou les flacons			
ORDRE DE PRELEVEMENT A RESPECTER AVEC HEMOCULTURES et BILAN DE COAGULATION			Nombre de retournements
1		Facon d'hémoculture aérobie (VERT) puis anaérobie (ORANGE) Facon de recherche de mycobactéries NE PAS COLLER D'ETIQUETTE SUR LE CODE-BARRE et SUR LE FOND DU FLACON 5 ml de sang minimum	5 retournements lents
2		Tube citraté (bouchon bleu) Remplissage parfait indispensable jusqu'au trait de jauge	8 à 10 fois
3		Tube sec sans séparateur (bouchon rouge) ou avec gel séparateur (bouchon jaune)	8 à 10 fois
4		Héparinate de lithium (bouchon vert)	8 à 10 fois
5		EDTA (bouchon violet)	8 à 10 fois
6		Fluorure de sodium (bouchon gris) Autres etc...	8 à 10 fois